

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto spray che consente di applicare, su piccoli tagli e abrasioni, una pellicola trasparente con effetto barriera.

Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe IIa secondo la Regola 4 dell'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (D.Lgs. 46 del 24/02/97 e ss.mm.ii.).

MARCATURA CE

Certificato CE secondo l'Allegato V, rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. (Organismo Notificato n. 0476).

CODICI CND/GMDN

CND: M9002

GMDN: ND

ARTICOLI DISPONIBILI E RELATIVI CODICI AZIENDALI

Articolo	Contenuto (ml)	Codice
Flacone spray	50	023.10

DESTINAZIONE D'USO

Per creare una barriera meccanica in caso di piccole ferite tipo tagli e abrasioni.

INFORMAZIONI PER USO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO*Istruzioni d'uso*

Pulire bene e asciugare la ferita prima di applicare il cerotto spray. Agitare la bomboletta prima dell'uso. Vaporizzare a 5-10 cm dalla pelle. Lasciare asciugare per un minuto. Riapplicare per quanto necessario.

Avvertenze/controindicazioni

Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare in zone ben ventilate. Erogare con brevi colpi senza diffusione prolungata. Non applicare su ferite che hanno il derma lesa o infette, ricorrenti o sulle bruciature. Non utilizzare sul viso. Non inalare. L'applicazione può provocare una leggera sensazione di prurito.

Conservazione/immagazzinamento

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C.

Trasporto

Non trasportare su mezzi scoperti.

Smaltimento

Smaltire secondo la legislazione vigente.

CARATTERISTICHE*Materiali componenti*

- Polimero acrilico (agente filmante)
- Acetato di etile (solvente)
- Dimetiletere (propellente)

Volume del prodotto

50 ml

Impermeabilità all'acqua

Impermeabile.

Permeabilità aria/vapore

Permeabile.

Sterilità

Non sterile.

Scadenza

30 mesi (dal mese di produzione, in confezionamento integro e correttamente conservato)

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento primario: bombola di alluminio (AL).

Confezionamento secondario: non applicato.

Imballaggio finale per la spedizione: scatola di cartone ondulato.

FABBRICANTE

PIETRASANTA PHARMA S.p.A.

Via di Caprino, 7

55012 CAPANNORI (LU)

Stabilimento di produzione

Via delle Cannelle, 225

Loc. S. Rocchino

55054 MASSAROSA (LU)

Note

- **Le informazioni raccolte nella presente scheda tecnica devono servire come guida per la migliore utilizzazione del prodotto.**
- **Questa scheda tecnica sostituisce la precedente ed è di proprietà di PIETRASANTA PHARMA che se ne riserva ogni diritto.**