



DERMADRY

MANOPOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO



DRMAN

_ CARATTERISTICHE PRODOTTO

La manopola monouso DERMADRY è un guanto in soffice tessuto non tessuto (TNT), monouso e monopaziente. Utile per detergere, lavare e asciugare adulti e bambini. Assicura un'igiene efficace e pratica durante la gestione dell'incontinenza e la pulizia quotidiana del corpo.

- Soffice ed assorbente, delicata con la pelle aiuta a prevenire le irritazioni e le dermatiti e garantisce massimo comfort al paziente.

_ SPECIFICHE

Materiale: tessuto non tessuto (TNT).

Tipologia: Spunlace 60 gr./mq. ±10% tol.

Caratteristiche chimico- fisiche:

Colore bianco, composto dal 75% di PET e dal 25% di viscosa.

Latex free.

Prodotto testato: il TNT utilizzato per la produzione della manopola è certificato Oeko Tex Standard 100.

Il TNT viene tagliato su misura e saldato ad ultrasuoni per la realizzazione del prodotto finale.

Dimensioni singola manopola: 16,5 x 21 cm

_ INDICAZIONI E MODALITA' D'USO IGIENE GIORNALIERA E CAMBIO

La manopola monouso è indicata per l'utilizzo da parte di operatori professionali per l'igiene e il trattamento di pazienti in strutture sanitarie o per l'assistenza domiciliare.

Prima di calzare la manopola assicurarsi che la parte più lunga copra il palmo della mano. Per asciugare la parte del corpo da trattare è sufficiente massaggiarla con il guanto. Terminata l'operazione, sfilare il guanto con la punta delle dita. Utilizzando l'altra mano, prendere la parte bassa del guanto e rovesciarla, lasciando la parte utilizzata all'interno, per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione non voluta.



DERMADRY

MANOPOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO

_ AVVERTENZE

La manopola è intesa come dispositivo monouso e monopaziente, pertanto non può essere utilizzata più di una volta. La manopola viene fornita non sterile e non prevede la sterilizzazione. Non usare su cute lesa. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

_ MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in confezioni ben chiuse, protette dalla luce e dai raggi del sole, in clima fresco e asciutto, in ambiente pulito e ben ventilato. Il prodotto in confezione integra se usato e conservato correttamente, ha una durata di 5 anni. Una volta aperta la confezione la durata massima è di 12 mesi, se correttamente conservato.

_ CARATTERISTICHE CONFEZIONAMENTO

Ogni confezione contiene 50 pezzi.

_ CATEGORIA DEL PRODOTTO

Dispositivo accessorio per l'igiene dei pazienti.
Prodotto in accordo con le Norme di Buona Fabbricazione (GMP – ISO 22716)

RAYS Health&Safety **RAYS SpA:** via Francesco Crispi, 26 – 60027 – Osimo (AN)
Stabilimento produttivo: via G. Giolitti, 10 – 60027 Osimo (AN)
www.rays.it – info@rays.it – www.dermarays.it



_ INFORMAZIONI LOGISTICHE

CODICE	PZ CONFEZIONE	PZ/CARTONE	EAN	
			CONFEZIONE	CARTONE
DRMAN	50	20	8051884687971	8051884688091