



DERMAWASH

MANOPOLA MONOUSO SAPONATA IN SOFFICE SPUGNA NON PLASTIFICATA



DRMANS

_ CARATTERISTICHE PRODOTTO

La manopola monouso **DERMAWASH** è un guanto in soffice viscosa monouso, morbido e pre-umidificato con un gel detergente senza risciacquo per l'igiene delle pelli fragili e mature. Contiene la quantità di gel necessaria per l'igiene quotidiana di una persona adulta.

La manopola monouso **DERMAWASH** è soffice ed assorbente, delicata con la pelle aiuta a prevenire le irritazioni e le dermatiti causate dall'incontinenza.

_ SPECIFICHE

Composizione:

- Lato A (parte saponata): Tessuto non tessuto: TNT agugliato
- Lato B (parte non saponata): Tessuto non tessuto: Spunbond

Dimensioni singola manopola: 16,5 x 23 cm

Il gel utilizzato è un detergente delicato, con un pH fisiologico e di colore blu. Testato dermatologicamente dal Centro di Cosmetologia dell'Università di Ferrara.

_ INGREDIENTI:

AQUA/WATER, SODIUM COCETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, CETEARYL ISONONANOATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CETEARETH-20, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETYL PALMITATE, CETEARETH-12, TOCOPHEROL, CI 42090

_ SOSTANZE FUNZIONALI:

- **Clorexidina**: agente antisettico ad ampio spettro in grado di rispettare il film idro-lipidico della pelle.
- **Acido Lattico**: ingrediente che dona idratazione, grazie al suo potere umettante.



DERMAWASH

MANOPOLA MONOUSO SAPONATA IN SOFFICE SPUGNA NON PLASTIFICATA

_ INDICAZIONI E MODALITA' D'USO IGIENE GIORNALIERA E CAMBIO

La manopola monouso è indicata per l'utilizzo da parte di operatori professionali per l'igiene e il trattamento di pazienti in strutture sanitarie o per l'assistenza domiciliare.

Prima di calzare il guanto, è necessario assicurarsi che la parte saponata copra il palmo della mano. Inumidire il guanto con acqua e massaggiare la parte da trattare delicatamente.

Per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione non voluta: Terminata l'operazione, sfilare il guanto con la punta delle dita. Utilizzando l'altra mano, prendere la parte bassa del guanto e rovesciarla, lasciando la parte utilizzata all'interno. Non è necessario risciacquare.

Per un maggiore comfort, le manopole possono essere riscaldate a microonde prima dell'utilizzo.

_ AVVERTENZE

Il prodotto è destinato ad infermieri professionisti. La manopola è intesa come dispositivo monouso e monopaziente, pertanto non può essere utilizzata più di una volta. La manopola viene fornita non sterile e non prevede la sterilizzazione. Non usare su cute lesa. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non portare il guanto a contatto diretto con gli occhi e le mucose irritate in quanto può causare irritazioni ed arrossamenti. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua.

_ MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in confezioni ben chiuse, protette dalla luce e dai raggi del sole, in clima fresco e asciutto, in ambiente pulito e ben ventilato. Il prodotto in confezione integra se usato e conservato correttamente, ha una durata di 3 anni. Una volta aperta la confezione la durata massima è di 3 mesi, se correttamente conservato.

_ CARATTERISTICHE CONFEZIONAMENTO

Ogni confezione contiene 25 pezzi.

_ MARCATURA

REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.



Intertek

RAYS SpA: via Francesco Crispi, 26 – 60027 – Osimo (AN)
 Stabilimento produttivo: via G. Giolitti, 10 – 60027 Osimo (AN)
 www.rays.it – info@rays.it – www.dermarays.it

_ INFORMAZIONI LOGISTICHE

CODICE	PZ CONFEZIONE	PZ/CARTONE	EAN	
			CONFEZIONE	CARTONE
DRMANS	25	25	8051884687889	8051884688138