

**CARATTERISTICHE E FUNZIONI CHIAVE DEL PRODOTTO**



**DUE IN UNO**

- Practi-Man è l'unico manichino sul mercato che racchiude il simulatore pediatrico e quello per adulti in un unico prodotto.
- Economico e redditizio.
- Peso piuma: di soli 2,2 kg, è facilmente immagazzinabile e trasportabile dal formatore



**UNA MANOPOLA - TRE POSIZIONI**

- La manopola sul retro permette di effettuare la selezione del simulatore, pediatrico o per adulti.
- Entrambi i simulatori includono un indicatore acustico che emette un click quando le compressioni toraciche sono eseguite in conformità alle Linee Guida AHA 2010.
- Posizionando la manopola su "N", non si udrà invece alcun click durante le manovre.



**FUNZIONE RESPIRATORIA REALISTICA**

- Il sistema di respirazione del Practi-Man è realistico ed unico sul mercato.
- La valvola di respirazione è progettata in modo da connettere naso, bocca e polmoni.
- La valvola è dotata di un sistema di non ritorno che impedisce agli studenti di inalare l'aria espirata dagli studenti che li hanno preceduti nella pratica, prevenendo quindi i contagi.
- L'iperestensione della testa snodata e l'occlusione del naso permettono al busto del manichino di alzarsi in risposta all'insufflazione d'aria.



**BLS-D**

- Practi-Man è il complemento essenziale per l'insegnamento del BLS-D.
- Le dimensioni ed il modo in cui il busto è progettato sono adeguati all'uso concomitante del trainer DAE.
- Il materiale che compone la pelle del manichino è idoneo ad essere usato con le plastre del trainer ed è facile da pulire.

**COME USARE E PULIRE IL MANICHINO**

Il produttore raccomanda, durante il corso di formazione, l'uso corretto di tutte le parti che compongono il manichino. In particolare, l'adeguata pulizia del simulatore e la sostituzione congrua dei componenti monouso assicurano la massima igiene, prevenendo nel contempo eventuali contagi in corso di prova pratica.

La valvola con sistema di non ritorno previene la contaminazione incrociata; tuttavia, la presenza di contaminazione biologica richiede che il polmoncino sia rimosso e gettato dopo ogni sessione.

**PULIZIA E DISINFEZIONE DEL MANICHINO**



Durante l'esercitazione pratica, la protezione addizionale in corso della respirazione bocca a bocca viene conferita dall'uso di una "face shield", che non è altro che un salvietta di plastica sottilissima da porre fra le labbra di chi lo usa e quelle del manichino.



Inoltre, allo stesso fine, anche la testa va rimossa e valvola di raccordo e il polmoncino vanno sostituiti.



Alla fine di ogni sessione, la pelle del viso del manichino deve essere rimossa per permettere la disinfezione delle labbra e del viso.



Per una disinfezione più profonda, la pelle del viso va separata del viso stesso ed entrambe devono essere pulite in una bacinella con acqua e disinfettante.

**ISTRUZIONI D'USO**




1 Rimuovere la pelle del busto.




2 Connettere la valvola al boccaglio.



3 Il polmoncino dev'essere posizionato sotto la barra metallica, mai al di sopra di essa.

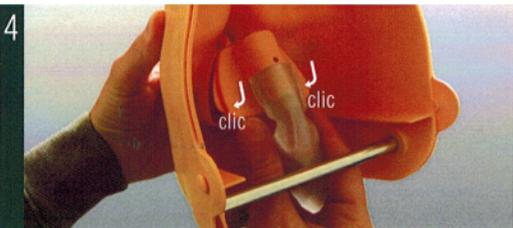

4 Una volta che il polmoncino e la valvola sono connessi, inserire, esercitando una certa pressione, le linguette della valvola nella parte posteriore della testa, fino a sentire il clic che indicherà che l'inserzione delle parti è avvenuta correttamente.

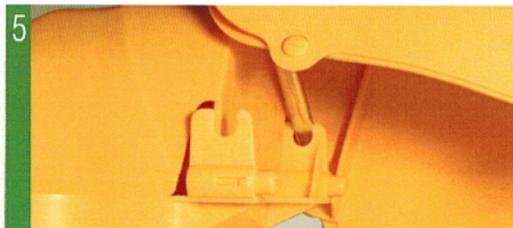

5 Collegare la testa al busto montando la barra di metallo sui due agganci ai lati del collo. Mantenere il viso a livello del connettore di assemblaggio finché non si sente uno scatto.



6 Posizionare il polmoncino sul busto e collocare l'adesivo sul circoletto premarcato.



7 Riposizionare la pelle del busto a ricoprire il busto stesso, ancorandola alle viti.

**CERTIFICATO DI GARANZIA**

Prima di abbandonare gli stabilimenti produttivi, questo prodotto è stato sottoposto ai più rigorosi controlli di qualità. Tuttavia, per problemi di funzionamento dovuti al montaggio e/o alle singole componenti, La preghiamo di leggere le condizioni di garanzia e di mettersi in contatto con il distributore ufficiale della Sua zona.

Mediante il presente certificato di garanzia, ENFAVI S.L. garantisce che questo prodotto è esente da difetti materiali e di manodopera al momento dell'acquisto e per un periodo successivo di DUE ANNI a decorrere dalla consegna.

Qualora durante il periodo di validità della garanzia il prodotto presentasse difetti imputabili al processo di fabbricazione dovuti a materiali e/o manodopera, il consumatore dovrà informare il distributore ufficiale nel termine massimo di dieci giorni dalla presa visione del difetto: il distributore ufficiale potrà optare/decidere tra la sostituzione dell'elemento danneggiato o la sua riparazione.

**CONDIZIONI DELLA GARANZIA:**

**Dati e documentazione:**

Per poter usufruire della garanzia è imprescindibile dimostrare l'acquisto del prodotto mediante la presentazione dello scontrino fiscale o la fattura di

acquisto e la bolla di consegna, qualora il prodotto sia stato consegnato posteriormente alla data d'acquisto, dovendo espressamente fornire i seguenti dati: nome completo e indirizzo dell'acquirente.

**Eccezioni:**

- La presente garanzia esclude espressamente i seguenti casi:
- Danni e/o guasti subiti dal prodotto come conseguenza di uso inadeguato, dolo o negligenza dell'utente, compreso l'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli a cui esso è destinato.
- Danni e/o guasti prodotti dall'uso di agenti esterni come calce o altri agenti nocivi chimici, ostruttivi o corrosivi.
- Danni e/o guasti dovuti a manutenzione scorretta o a mancanza di pulizia.
- Danni e/o guasti derivati dall'uso di ricambi non originali del marchio.

**Ambito geografico:**

La garanzia sarà estesa a tutti quei paesi in cui questo prodotto sia distribuito da ENFAVI, S.L. o da un distributore autorizzato da ENFAVI, S.L..

**Annullamento della garanzia:**

- La garanzia del prodotto sarà considerata non valida:**
- Qualora siano presenti danni arrecati da riparazioni effettuate da persone estranee al servizio tecnico autorizzato da ENFAVI, S.L., così come nel caso in cui si sostituiscono o si usino parti aggiuntive o accessori non originali.
- In presenza di manipolazione dei dati della fattura, scontrino fiscale o bolla di consegna.